

IMPREGNOVANÉ UTIERKY S HYDRO-ALKOHOLOVÝM DEZINFEKČNÝM ROZTOKOM URČENÉ NA POVRCHY



PHAGO'WIPES DASR



- Pripravené k okamžitému použitiu
- Široké dezinfekčné spektrum
- Bezoplachové

POUŽITIE

PHAGO'WIPES DASR sa používa na rýchlu dezinfekciu drobných zariadení, vozíkov, vonkajších povrchov neinvazívnych zdravotníckych prostriedkov a menších povrchov. Utierky je možné použiť bez potreby oplachu povrchov, ktoré môžu prísť do priameho kontaktu s potravinami (stôl, pracovná doska, podnosy, vozíky na jedlo, krájače, rezačky, atď.)

Na povrchu nezanechávajú stopy.

ZLOŽENIE

Aktívna účinná látka:

Ethanol (CAS No: 64-17-5): 52.70% w/w.

100% všetkých zložiek je prírodného charakteru

PT2 – Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na človeka alebo zvieratá.

PT4 – Potraviny a krmivá

CHARAKTERISTIKA

Netkané utierky

Farba: modrá (SA0082440)

biela (SA0109532)

Zápach: alkoholový

Bod vzplanutia: (najnižšia teplota, pri ktorej sa môže odpariť dostatok tekutiny – alkoholu- aby sa vytvorila horľavá koncentrácia plynu): 23°C

NÁVOD NA POUŽITIE

PHAGO'WIPES DASR sú pripravené na okamžité použitie.

Utrite povrch, ktorý chcete dezinfikovať.

Neoplachujte.

Nechajte pôsobiť 15 minút pre úplné dezinfekčné spektrum, alebo podľa požadovanej účinnosti.

KOMPATIBILITA

Pri plexiskle najskôr vykonajte test.

ANTIMIKROBIÁLNA AKTIVITA

BAKTERICÍDNA

EN 1040, 5 min

EN 1276 zahŕňa *S. typhimurium* and *L. monocytogenes*, 30 s

EN 13727+A2, 5 min

EN 13697 including *S. typhimurium* and *L. monocytogenes*, 2 min

EN 16615, 1 min

FUNGICÍDNA

EN 1275, 15 min

EN 1650, 15 min

EN 13624, 15 min

EN 13697, 5 min

EN 16615, 5 min

MYKOBAKTERICÍDNA EN

14348, 5 min

TUBERKOLICÍDNA

EN 14348, 5 min

VIRUCÍDNA

EN 14476+A2 (Adenovirus and Norovirus), 15 min.

Aktívna na Rotavírus, Coronavírus, HBV, HCV, HIV, Herpes vírus, orthomyxovírus, Influenza A/H5N1 and Influenza A/H1N1, 15 min.

SKLADOVANIE

Expirácia: 3 roky od dátumu výroby.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽITÍ

Iba na profesionálne použitie. Pri používaní biocidov buďte opatrní. Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu a ďalšie dodané informácie.

BALENIE

SA0082440 200 modrých utierok (42 balení po 10 boxov)

Veľkosť boxu : ø10cm, V: 23,4cm

Veľkosť utierky: 20x20cm

SA0109532 200 bielych utierok (64 balení po 10 boxov)

Veľkosť boxu: ø11cm, V: 18,5cm

Veľkosť utierky : 20x17cm



CHRISTEYNS